

# Ladda om Levosertone

Vid behov kan du ladda om Levosertone. **Gör så här:** Frigör inlägget genom att dra tillbaka den BLÅ glidaren mot den GRÖNA med hjälp av tummen. I detta läge frigörs trådarna från klyftan. Ladda nu om Levosertone genom att skjuta den BLÅ glidaren fullt framåt och upprepa sedan laddningsstegen.



Se bipacksedeln  
eller besök [fass.se](http://fass.se) för  
mer information

Titta även på Insättningsguide  
– videon, genom att skanna  
QR-koden eller gå in på  
[www.levosertone.se](http://www.levosertone.se).



**Levosertone (levonorgestrel) 20 mikrogram/24 timmar intrauterint inlägg.** Rx. EF. ATC-kod: G02BA03. Intrauterina preventivmedel, intrauterint inlägg av plast med gestagen.  
**Indikation:** Preventivmedel. Behandling av kraftiga menstruationsblödningar. Levosertone kan vara särskilt användbart för kvinnor med kraftiga menstruationsblödningar som kräver (reversibelt) preventivmedel. **Kontraindikationer:** konstaterad eller misstänkt graviditet, pågående eller reciderande bäckeninflammation, infektion i yttre könsorgan, endometrit postpartum, infekterad abort under de tre sista månaderna, cervicit, cervixdysplasi, misstänkt eller bekräftad malignitet i uterus eller cervix, levertumör eller annan akut eller svår leversjukdom, medfödd eller förvärvad abnormitet i uterus inklusive fibrom om de deformerar uterus kavitet, odiagnostiserad blödning från uterus, tillstånd i samband med ökad mottaglighet för infektioner, aktuella eller misstänkta hormonberoende tumörer såsom bröstcancer, akuta maligniteter som påverkar blodet eller leukemier förutom om de är i remission, nylig trofoblastsjukdom med kvarstående förhöjda hCG-nivåer, överkänslighet. **Varningar och försiktighet:** Det rekommenderas starkt att Levosertone endast sätts in av läkare/sjukvårdspersonal som har erfarenhet och/eller har tillräcklig utbildning av insättningar av intrauterina inlägg med levonorgestrel. Innan insättning ska en fullständig medicinsk personlig anamnes och familjeanamnes tas. Puls och blodtryck bör mätas och en bimanuell bäckenundersökning bör utföras för att fastställa uterus position. Patienten bör undersökas igen sex veckor efter insättning och ytterligare undersökningar ska genomföras vid klinisk indikering och anpassas efter den enskilda kvinnan snarare än som en rutinåtgärd. Vid insättningsvärighet och/eller mycket stark smärta eller blödning under eller efter insättning, ska fysisk undersökning och ultraljudsundersökning utföras omedelbart för att utesluta perforering av uterus eller cervix. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling. **Fertilitet, graviditet och amning:** Levosertone är inte avsett att användas under eller vid misstänkt graviditet. Vid oplanerad graviditet med Levosertone in situ, ska extrauterin graviditet uteslutas och inlägget ska avlägsnas och avbrytning av graviditeten ska övervägas eftersom hög risk för graviditetskomplikationer (abort, infektion och sepsis) föreligger. Användningen av intrauterint inlägg med levonorgestrel ändrar inte den kvinnliga fertilitetens förlopp efter avlägsnandet av det intrauterina inlägget. Levonorgestrel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk efter användning av intrauterint inlägg med levonorgestrel. Eftersom inga effekter på barnet förväntas kan amning fortsätta vid användning av Levosert. **Biverkningar:** Biverkningar är vanligare under de första månaderna efter insättandet men avtar under långvarig användning. Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 10 % av patienterna) omfattar uterus-/vaginalblödning inklusive stänklödning, oligomenorré, amenorré och benigna ovarialcyster, samt procedurall smärta och blödning. **Förpackningar:** 1 styck. **För ytterligare information och pris se [www.fass.se](http://www.fass.se). Senaste datum för översyn av produktresumén: 2021-06-29.** **Innehavare av godkännande för försäljning:** Gedeon Richter Plc, Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Ungern. **Information lämnas av:** Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. Tel: 08- 611 24 00. **Medicinsk information:** [medinfo.se@gedeonrichter.eu](mailto:medinfo.se@gedeonrichter.eu), tel: 08-506 394 76.



# INSÄTTNINGSGUIDE

## Levosertone® (levonorgestrel)




### Startläge

Öppna förpackningen, ta tag i handtaget och ta ut införaren genom att vrida försiktigt. Sätt tummen på den BLÅ glidaren och skjut framåt så långt det går.


Den BLÅ glidarens linje (nummer ett) ska vara i linje med handtagets markerade linje.

Dubbellinjerade markeringen på den GRÖNA glidaren (nummer två) ska vara i linje med handtagets dubbellinjerade markering.

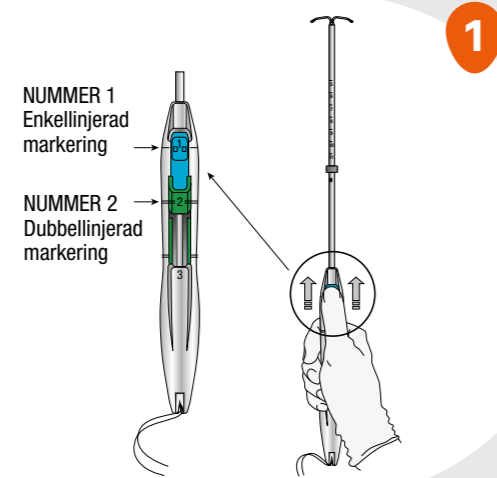

1

4

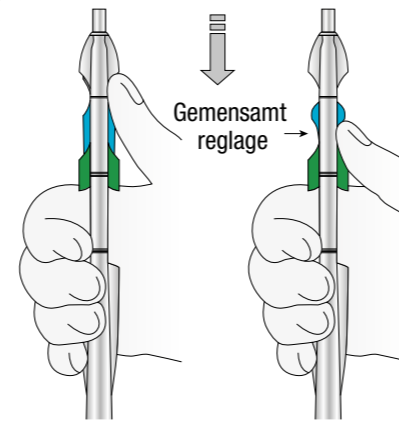


### Frigör armarna på det intrauterina inlägget

Tryck försiktigt tillbaka den BLÅ glidaren tills du känner motstånd.

Den BLÅ och GRÖNA glidaren ska gå ihop till ett gemensamt reglage. Flytta inte den BLÅ glidaren mer än nödvändigt.

7

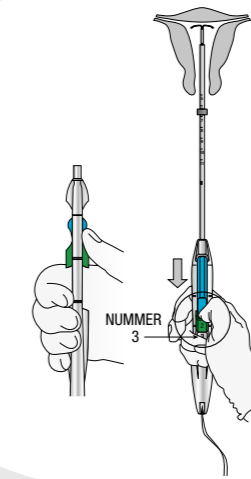

### Lösgör Levosertone från insättningsröret

Håll införaren stadigt och behåll positionen i förhållande till cervix. Flytta båda glidarna ner mot (nummer 3) på handtaget tills ett klick hörs och den GRÖNA indikatorn nederst på handtaget är synlig.


### Ladda Levosertone

Säkerställ att armarna på det intrauterina inlägget är horisontella. Fortsätt att trycka den BLÅ glidaren framåt, dra samtidigt varsamt i trådarna rakt bakåt, med jämn spänning. Lås genom att dra tråden uppåt eller nedåt i klyftan i botten av handtaget, släpp sedan trådarna. Håll kvar trycket på glidaren i det främre läget. Knopparna på de laterala armarna ska sitta något över toppen på insättningsröret.

### Ställ in markören


Justera övre kanten av markören på insättningsröret till det livmodersdjup som uppmätts med sonden. Säkerställ att markörens platta sidor är i samma horisontella plan som handtaget.

Levosertone kan laddas om.

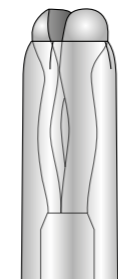

2

5

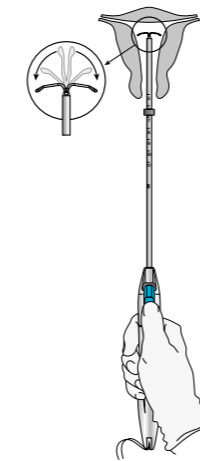


Håll den GRÖNA glidaren så att den dubbellinjerade markeringen på glidaren och insättningshandtaget är i linje med varandra. Det intrauterina inläggets armar öppnas i nedre livmodersegmentet.

**DRA INTE** tillbaka glidarna längre!

**VÄNTA** 10–15 sekunder tills armarna öppnas helt.

8

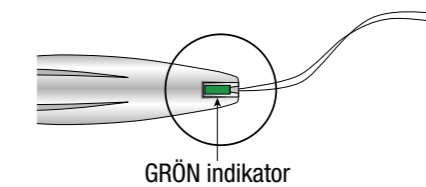

### Säkerställ att trådarna är lösgjorda från klyftan


Titta på klyftan, säkerställ att trådarna lösgjorts. Om de inte lösgjorts eller om du inte hör ett klick, ta tag i trådarna och dra försiktigt trådarna ur klyftan.

### Insättning av Levosertone

Fortsätt att trycka den BLÅ glidaren framåt. För insättningsröret in genom cervix tills den övre änden av markören är 1,5–2 cm från livmodern.


**FÖR INTE IN** markören i livmodern.

**TVINGA INTE IN** införaren. Dilatera livmoderhalskanalen om det behövs.

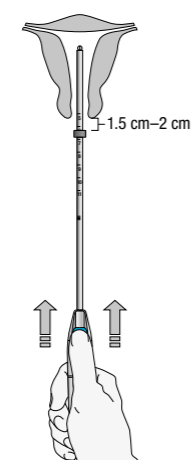

3

6

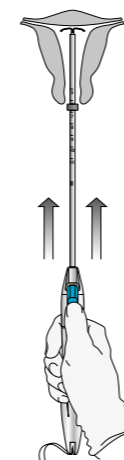


### Placera Levosertone i korrekt läge

För in insättningsröret tills markören nuddar cervix, utan att flytta på glidarna. Levosertone är nu placerad i livmoderns övre del (fundus).

**SLUTA TRYCKA** vid motstånd.

**OBS!** Placering vid livmoderns översta del är viktig för att undvika utstötning.

9

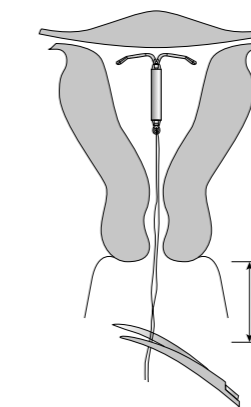

### Avlägsna införaren och klipp trådarna

Dra tillbaka införaren från livmodern.

Klipp det intrauterina inläggets trådar rakt av. Lämna cirka 3 cm utanför livmoderhalsen.

**OBS!** Klipp inte trådarna i vinkel då det kan lämna vassa kanter.

**STRÄCK ELLER DRA INTE** i trådarna för att undvika att inlägget flyttar på sig.